


Montre parlante " TOUCH " de PFAPRO avec annonce de l'heure et de la date la montre du XXI ième siècle

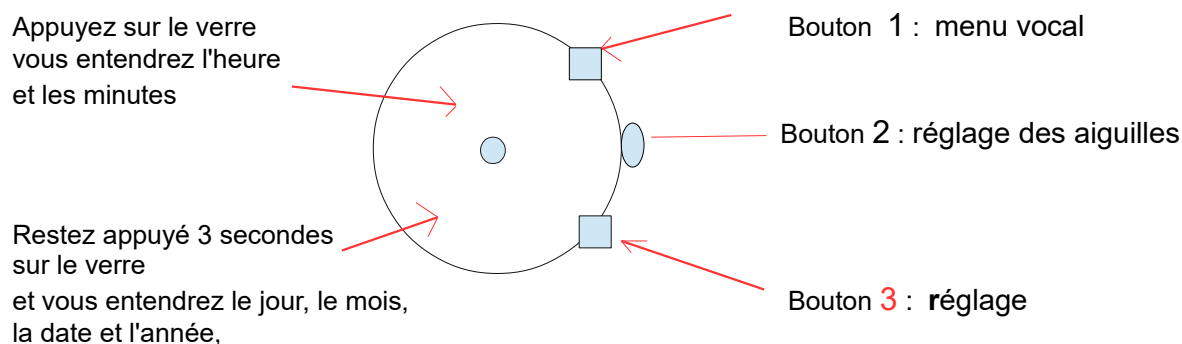

Pour activer ou non l'alarme :

- appuyez 1 fois sur le bouton **1** et vous entendrez : "alarme désactivée".
- appuyez 2 fois sur le bouton **2** et vous entendrez : "alarme activée".

Appuyez sur le verre pour entendre l'heure et restez appuyé 3 secondes pour entendre la date.

Pour activer le menu vocal : pressez et restez appuyé pendant 3 secondes sur le bouton (**1**)

- 1)- appuyez 1 fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Annonce de l'heure désactivée** , si vous désirez entendre l'heure toutes les heures, exemple 10H, 15H, 21 H.....appuyez sur le bouton **3** vous entendrez : **heure activée**
- 2)- appuyez une deuxième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **choisissez le son de l'alarme**
pressez le bouton **3** et choisissez soit "Dong Dong", soit le chant du coq, ou 3 fois Bip Bip
- 3)- appuyez une troisième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Réglez les heures de l'alarme**
pressez le bouton **3** et sélectionnez l'heure.
- 4)- appuyez une quatrième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Réglez les minutes de l'alarme**
pressez le bouton **3** et sélectionnez les minutes.
- 5)- appuyez une cinquième fois sur le bouton **1** et vous entendrez : **Réglez l'année**
pressez le bouton **3** et sélectionnez l'année.
- 6)- appuyez une sixième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Réglez le mois**
pressez le bouton **3** et sélectionnez le mois.
- 7)- appuyez une septième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Réglez la date**
pressez le bouton **3** et sélectionnez le jour.
- 8)- appuyez une huitième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Réglez les heures**
pressez le bouton **3** et sélectionnez l'heure.
- 9)- appuyez une neuvième fois sur le bouton (**1**) et vous entendrez : **Réglez les minutes**
pressez le bouton **3** et sélectionnez les minutes.

Maintenant la montre parlante TOUCH de PFAPRO est réglée

Pile : il y a 1 pile CR2032 pour la voix et pour le mouvement des aiguilles.
Dès que le son devient faible ou qu'il n'y a plus de son, il faut changer la pile CR2032.

Pour changer la pile, il faut enlever le couvercle du boîtier (sans toucher aux 2 trous qui sont les hauts-parleurs.) et enlever la pile de son logement puis insérer une pile neuve.

Attention la montre parlante TOUCH n'est pas étanche,
elle est garantie 1 an, sauf la pile, le bracelet, le verre et si la montre est cassée.

